

COVID-19 ŞÜPHELİ OLGULARIN KLİNİK ÖRNEKLERİNİN PAKETLENME ŞEMASI



1

Örnek kaplarının ağzı sıkıca kapatılır ve dış yüzeyleri **dekontamine edilir**



Örnek alındıktan sonra **ELDİVEN ÇIKARILIR**
EL YIKANIR
Paketlemeye başlamadan önce **YENİ ELDİVEN GİYİLİR**



2

Örneğin etrafı emici malzeme ile sarılır



3

Her bir örnek ayrı ayrı ağzı kilitli bir poşete yerleştirilir



4

Poşetin ağzı kapatılır **Eldiven çıkarılır**
El hijyeni sağlanır



5

YENİ BİR ELDİVEN GİYİLİR
Örnekler 2. poşete yerleştirilir



6

Tüm örnekler büyük bir kaba yerleştirilir



7

Kabın ağzı sıkıca kapatılır



8

Hasta istem formları biyolojik materyal bulunan kabın **DIŞINA** yerleştirilir



9

Biyolojik materyali taşıyan kap taşıma kutusuna yerleştirilir



Görseller
<https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-wuhan-novel-cov-2019-ncov>
internet adresindeki rehberden alınarak uyarlanmıştır.
26.03.2020

